

CC DISK PMMA PINK je narejen iz PMMA s pigmenti. Uporablja se v CAD/CAM rezkalnih strojih za izdelavo visoko estetskih protez.

Uporablja se lahko za rezkanje baz totalnih protez, parcialnih protez ter začasnih protez pri takojšnji obremenitvi zobnih implantatov. Zobna proteza je zasnovana v programski opremi CAD in izdelana s 5-osnim rezkalnim strojem. Akrilatni umetni zobje so pritrjeni na osnovo proteze s PMMA smolo ali svetlobno polimerizirajočim kompozitnim materialom.

Indikacije:

- za rezkanje baz totalnih protez, parcialnih protez
- za izdelavo začasnih protez pri takojšnji obremenitvi zobnih implantatov

Predvideni uporabniki: Izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom – zobotehnikom.

Merila za izbor pacientov: Popolnoma ali delno brez zobni pacienti.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Upogibna trdnost: 114 MPa

Trdota po Vickersu: 26,6

E-modul: 2771 MPa

Preostala monomera: < 1%

Premer diskov: 94-100 mm

Debelina diskov: 25 - 30 mm;

Barva: roza

Varnostno opozorilo: Pri obdelavi in poliranju nastanejo delci, zato je priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic in zaščitne maske s filtri FFP1.

Opozorilo: V zelo redkih primerih lahko bolnik razvije alergijo na PMMA. Za izbiro ustreznega materiala je odgovoren zobozdravnik.

Stranski učinki: V zelo redkih primerih lahko bolnik razvije alergijo na PMMA. Za izbiranje za primeren material je odgovoren zobozdravnik.

Obvestilo: Vsak resen incident, ki se je zgodil v zvezi z napravo, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež.

Shranjevanje: Hraniti pri sobni temperaturi.

Garancija!

Ne glede na to, ali so dana ustno, pisno ali s praktičnimi navodili, naša priporočila za uporabo temeljijo na naših lastnih izkušnjah in poskusih in jih je mogoče obravnavati le kot standardne vrednosti. Naši izdelki so predmet nadaljnjega razvoja. Zato so pridržane spremembe v konstrukciji in sestavi.

Proizvajalec:



OPEKARNIŠKA CESTA 026, SI – 3000 CELJE

tel: +386/34256200; fax: +386/34256210

e-mail: info@interdent.cc; www.interdent.cc

Verzija 02-2024

Datum: 15.05.2024