




## Navodilo za uporabo Easy-Form sistema:

**Izolacija:** Najprej z Interfilmom izolirajte vse plastične dele. S pomočjo zraka odstranite odvečno izolacijsko sredstvo. Zadostuje tanek nanos Interfilma.

### Sestavitev sistema (slika 1)

Sestavite artikulacijsko ploščo št.3, model za izlivanje jedra št.2 in zagozdo št.1, po vrsti, kot je prikazano na sliki in pritrдите dele z vijakom št.4.

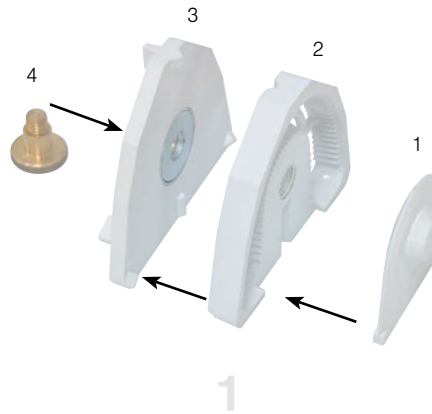

### Izbijanje jedra modela (slika 7,8,9)


Na mesto vijaka za pritrđitev postavimo vijak za izbijanje. S privijanjem vijaka za izbijanje dosežemo dviganje jedra modela. Če se jedro modela težko izlušči, popustimo vijak za izbijanje in pritisnemo od spodaj s palcema na distalne dele jedra modela. Zagozdo odstranimo z vlečenjem v distalni smeri.

### Priprava odtisa (slika 2)


Vestibularno, lingvalno oziroma palatinalno obrežite višek material.

### Podlaganje (slika 3)

Pri izdelavi modela za zgornjo čeljust podložite zagozdo s plastelinom, silikonom ali voskom. To hkrati služi za pritrđitev žlice na odtis in olajša prilagoditev modelu.

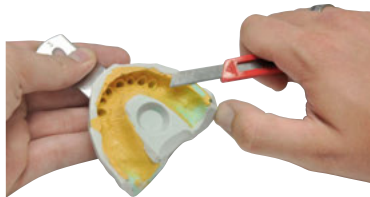

2

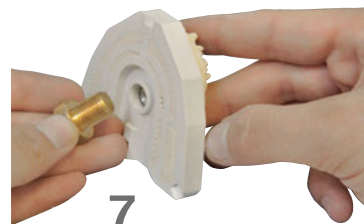

7

### Mavec (slika 4)

Za izdelavo enega modela je potrebno zamešati 70-100g mavca. Veživna ekspanzija mavca ne sme biti višja od 0,1%. Priporočamo tiksotropen, super trd mavec, kot sta Interrock new in Interstone new.



3




8

### Vlivanje

Odtis in Easy-Form položimo na vibrator in polnimo z mavcem

**Pomembno:** Zagozda za pritrđitev ne sme biti pokrita z mavcem več kot 5 mm proti oralnemu delu, da jo kasneje lahko izvlečemo.

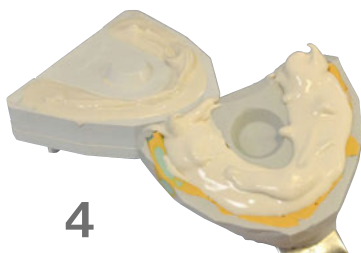

4




9

### Izluščenje modela (slika 5 in 6)

Ko se mavec strdi, odstranimo odtis in vijak za pritrđitev. Odstranimo tudi artikulacijsko ploščo z magnetom.



5

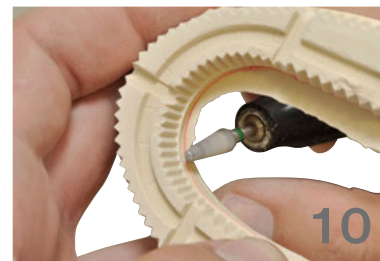

10



6



11

### Obdelava jedra modela (slika 10,11)

S pomočjo rezkarja za mavec odstranimo višek mavca z jedra modela in z modelno žagico naredimo zarez.

**Majhen nasvet:** najprej zarezemo z ročno modelno žagico, šele potem uporabimo diamantirano separirno ploščico.

**Pomembno:** Jedro modela razrežemo na več segmentov, ki ne smejo biti daljši od 4cm. S tem zmanjšamo napetost v modelu.

### Ponovna namestitvev posameznih segmentov:

Postavite magnetni vijak v model za izlivanje jedra in nameštite posamezne segmente po oznakah. Posamezne segmente pritrđite s pomočjo zagozde. Natančnost postavljenih segmentov lahko kontrolirate s pomočjo kontrolnega roba na zagozdi in retencij na modelu za izlivanje jedra.

### Postavitev v artikulato

Za postavitev modela v artikulato enostavno sestavite artikulacijsko ploščo in model za izlivanje jedra (Split-Cast-System)

**Pomembno:** sestavni deli Easy - Forma se ne smejo segreti nad 60°C, niti polivati z vrelo vodo.